



Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation et suivre les indications.

#### 1. Consignes de sécurité

- Ne pas stocker dehors, ne pas laisser au soleil.
- Stocker dans une pièce sèche, éviter les pièces humides
- Stocker les coussins loin d'objets pointus ou tranchants afin d'éviter perforation et déchirure.
- Vérifier l'absence de perforations et de fuites dans l'enveloppe du coussin avant utilisation
- Vérifier la stabilité du coussin et son positionnement correct
- Ne pas utiliser lors de températures extrêmes (supérieures à environ 38°C ou inférieures à 0°C).
- Ne pas s'agenouiller ou se mettre debout sur le coussin.
- Si vous constatez l'apparition de rougeur sur votre peau, cessez immédiatement l'utilisation du produit et consultez votre médecin.

#### 2. Indication

- Le coussin de positionnement est conçu pour améliorer la circulation sanguine dans les jambes, réduire les pressions et soulager les douleurs résultant de phlébites, de varices ou de gonflements. Il peut également aligner la colonne vertébrale de l'utilisateur et réduire les douleurs de dos bénignes.
- Il peut se plier en deux pour un rangement compact.

#### 3. Descriptif du produit

- Les coussins sont composés d'une enveloppe contenant des microbilles de polystyrène (PSE) dont le diamètre maximum est de 1 mm ou de microfibres siliconées.
- La housse est composée de Polyuréthane recouvert de polyester (51% PU et 49% PES)

#### 4. Entretien

- Lavage de la housse :

Enlever le coussin de la housse. La housse est lavable en machine à 30°C. Sécher à plat à l'abri de toute source de chaleur.

#### 5. Traitement des déchets

- Mettre au rebut ce produit en conformité avec la réglementation en vigueur.

#### 6. Garantie

- Le produit est garanti 2 ans, à partir de la date d'achat, contre tout vice de fabrication.
- Ce produit est biocompatible